



Kod produktu: ML595

Producent: Medisept

Zapach

tea tonic

Zastosowanie

do użytku codziennego

Velox® Duo Wipes tea tonic to chusteczki do mycia i szybkiej dezynfekcji małych powierzchni

Warianty produktu

Indeks	Cena
MS* Chusteczka alkoholowa do dezynfekcji VELOX DUO WIPES wkład 100szt. 12 ML595	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Cechy produktu:

- Działają już od 30 sek. na wirusy osłonkowe, Rota, Noro, bakterie, grzyby, prątki gruźlicy
- Zalecane do sprzętu medycznego, aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, końcówek stomatologicznych, łóżek pacjentów, szafek, blatów
- Do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych mających kontakt z żywnością
- Chusteczki włókninowe 19 x 15 cm, 50 g/m² – flow pack
- Chusteczki włókninowe 13 x 20 cm, 23 g/m² -puszka/wkład
- Gwarancja skuteczności potwierdzona badaniami
- Wysoka redukcja ryzyka zakażenia
- Szybki efekt czystej i zdezynfekowanej powierzchni
- Dają efekt odświeżenia
- Ekonomiczne w użyciu.

Sposób użycia: Chusteczkę wyjąć z opakowania i przetrzeć nią powierzchnie. Odczekać 30 sekund. W warunkach brudnych czas działania na wirusy osłonkowe oraz rotawirusy wynosi 60 sekund. W przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością należy spłukać je wodą pitną. Pozostałe powierzchnie nie wymagają spłukania wodą. Dokładnie zamykać opakowanie. Po otwarciu opakowanie zużyć w ciągu 21 dni. Nie używać jeśli chusteczka jest sucha. Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie alkoholi (np. szkło akrylowe). Produkt przeznaczony do użycia przez profesjonalnego użytkownika

Skład: 50 sztuk zawiera:
200 g roztworu nasączonego.

100 g roztworu zawiera:
etanol, propan-2-ol

Opakowanie:

50 szt., typu flow pack z etykietą samoprzylepną, puszka 100 szt., wkład 100 szt.

Zastosowanie:

Velox® Duo Wipes tea tonic to chusteczki do mycia i szybkiej dezynfekcji małych powierzchni w obszarze medycznym, domach

opieki, sanatoriach, salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich, kosmetycznych, gabinetach masażu, przedszkolach, szkołach oraz do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Zalecane do małych powierzchni sprzętu medycznego: łóżek i foteli zabiegowych, łóżek, aparatury medycznej i operacyjnej oraz do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji oraz łyżek protetycznych i wycisków silikonowych.